



Ośłona kosmetyczna po podgrzaniu przybiera żądany kształt. Po naciągnięciu osłony na protezę, należy ją ogrzewać za pomocą opalarki od palców stopy ku górze. W razie potrzeby użyć kleju w celu całkowitego zabezpieczenia. Może być wykorzystana u pacjentów z amputacją na wysokości podudzia. Przy protezach na podciśnienie istnieje możliwość zrobienia w osłonie małego otworu.

### Cechy EasySkin:

- Wysoki komfort
- Dostępne dwie wielkości
- Dopasowuje się do kształtu
- Brak linii przejścia w kostce

### Kod produktu


### TSK - osłona kosmetyczna

TSK-X-L  
TSK-X-S


EasySkin osłona kosmetyczna duża  
EasySkin osłona kosmetyczna mała

Symbol "X" oznacza kolor. Dostępny jest wzór kolorów 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 (przykłady kolorów na marginesie tej strony).

Aby wybrać odpowiedni rozmiar, należy postępować zgodnie z instrukcjami na drugiej stronie.

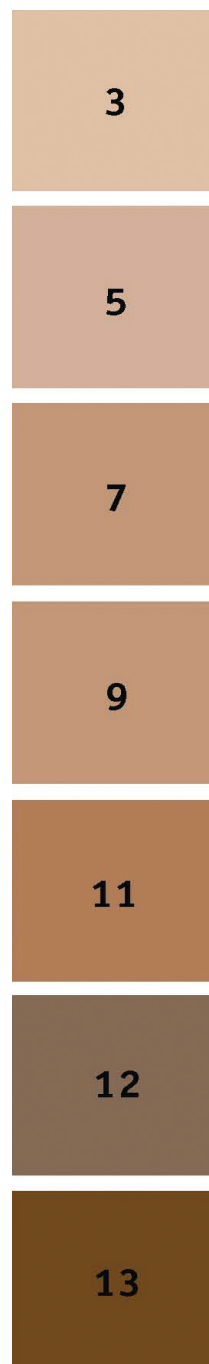

## TSK. Przekrój osłony kosmetycznej

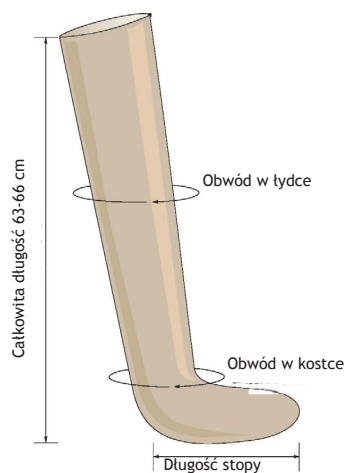TSK. Tabela rozmiarów  
Wymiary

<b>MALA</b>	<b>Długość stopy</b>	<b>Obwód w kostce</b>	<b>Obwód w łydce</b>
<b>Minimum</b>	18 cm	17 cm	25 cm
<b>Maximum</b>	23 cm	22 cm	35 cm
<b>DUŻA</b>	<b>Długość stopy</b>	<b>Obwód w kostce</b>	<b>Obwód w łydce</b>
<b>Minimum</b>	23 cm	22 cm	35 cm
<b>Maximum</b>	30 cm	29 cm	45 cm